



Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Flächendesinfektion

VAH gelistet

Produkttyp

KK Schnelldesinfektion ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Flächendesinfektion. Das QUAT-haltige Produkt ist frei von Phenolen und Aldehyden. Nach Abschluss der Einwirkzeit trocknen behandelte Flächen schnell ab. Das Produkt kann sowohl für die Wischdesinfektion als auch für die Sprühdesinfektion eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete

Zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen nicht-invasiver, unkritischer Medizinprodukte und medizinischem Inventar sowie wischbaren Flächen aller Art. Geeignet für:

- Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische
- Medizinisch genutzte Bereiche in Arzt- und Zahnarztpraxen
- Schnelldesinfektion zwischen Operationen und Behandlungen
- Bekleidung wie OP-Schuhe, OP-Schürze, Röntgenschürze
- Alkoholbeständige Oberflächen medizinischer Geräte
- Materialien siehe Seite 2 Materialverträglichkeit

Nicht geprüft für den Lebensmittel- und Veterinärbereich. Nicht geeignet für die Desinfektion von Haut und Händen sowie zur Desinfektion invasiver Medizinprodukte. Nicht geeignet zur Desinfektion semikritischer und kritischer Medizinprodukte.

Anwendung

- 1) Vor jeder Desinfektion Handschuhe, Mundschutz und Augenschutz anlegen! Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei kontaminierten Flächen die sichtbaren Verschmutzungen mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch aufnehmen und Tuch entsorgen.
- 2) Fläche mit unverdünntem Produkt desinfizieren:
Wischdesinfektion: Desinfektionslösung auf ein sauberes, trockenes Einmaltuch geben oder direkt auf die Fläche aufbringen und unter leichtem Druck abreiben (nass wischen).
Sprühdesinfektion: Das Sprühdesinfektionsverfahren ist nur für schwer zugängliche, verwinkelte Oberflächen anzuwenden. Oberflächen vollständig mit Desinfektionslösung benetzen.
- 3) Oberflächen während der Einwirkzeit vollständig benetzt halten.
- 4) Nach Ablauf der Einwirkzeit: Rückstände mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch entfernen oder abtrocknen lassen.

Besondere Hinweise

Anwendung nur durch Fachpersonal.
Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde. Bereits entnommenes Desinfektionsmittel nicht wieder ins Originalgebinde zurückgießen.
Produkt nicht mit anderen Chemikalien mischen.
Nicht auf Acrylaten anwenden. Ergänzende Informationen zur Materialverträglichkeit siehe Seite 2.
Elektrische Geräte vor Anwendung des Produktes spannungsfrei machen. Lassen Sie keine Desinfektionslösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen.

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten:

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts (KRINKO) im Internet unter „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen.“

Stand: 23.06.2022

Wirkspektrum

Wirksamkeit (gebrauchsfertiges Produkt, bei Raumtemperatur)	Prüfnorm	Einwirkzeit
Bakterien		
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, MRSA (hohe Belastung)	EN 13727	30 sek
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (hohe Belastung ^{*1})	EN 13697	5 min
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa E. coli (hohe Belastung)	EN 17387	5 min
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa (hohe Belastung)	EN 16615	1 min
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, (hohe Belastung)	Standard- methode n VAH ^{*2}	5 min
Mykobakterien/TB		
M. terrae, M. avium (hohe Belastung)	EN 14348	1 min
Hefen		
C. albicans (hohe Belastung)	EN 13624	30 sek
C. albicans (hohe Belastung)	EN 16615	1 min
C. albicans (hohe Belastung ^{*1})	EN 13697	5 min
C. albicans (hohe Belastung)	EN 17387	5 min
C. albicans (hohe Belastung)	Standard- methode n VAH ^{*2}	5 min
Viren		
Behüllte Viren		
MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (hohe Belastung)	EN 14476	30 sek
BVDV (hohe Belastung)		
Unbehüllte Viren		
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)	EN 14476	5 min
Humaner Rotavirus (niedrige Belastung)		5 min
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)		5 min
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 16777	5 min
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)		5 min

*1 hohe Belastung gem. EN 13697:2015-06 zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen - Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2)

*2 Flächendesinfektion mit Mechanik, praxisnaher 4-Felder-Test

*3 Bitte beachten Sie, dass Duftstoffe potentiell Allergien auslösen können.

Materialverträglichkeit

Metalle Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing

Kunststoffe PSU, PVC, Silikon

Gummi EPDM, Latex

Hinweis:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Einwirkzeit ist bei den oben genannten Materialien keine Materialschädigung zu erwarten. Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Linoleumböden vermeiden. Nicht auf Acrylaten anwenden. Bei Acrylglas (Plexiglas®) Gefahr von Spannungsrisskorrosion. Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten sowie nicht aufgeführten Materialien vor Gebrauch an unauffälliger Stelle Materialverträglichkeit prüfen.

Zusammensetzung

In 100 g gebrauchsfertiger Lösung sind enthalten:

33,66 g Ethanol, 15,84 g 2-Propanol,
0,05 g Didecyltrimethylammoniumchlorid
70%, Duftstoffe (entfällt bei neutral)*3

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen: klar, farblos
Dichte (20°C): 0,900 – 0,920
Flammpunkt (EN 22719) 22,75 +/- 0,5 °C

Lagerhinweise

Lagerung bei 5 – 25°C. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Stehend lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Weitere Hinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.



UN 1987

Listung

Listung VAH
Medizinprodukt Klasse
II a

CE 0123

Stand: 23.06.2022

Gutachten & weiterführende Informationen

KK Schnelldesinfektion wurde von unabhängigen Laboren begutachtet. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail unter office@kk-store.de oder telefonisch unter D-0 54 91/99 97 0 erreichen. Bitte melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Liefereinheiten

1 Liter Lemon	10221/1
1 Liter Classic	10204/1
1 Liter Neutral	10210/1
5 Liter Lemon	10220_05
5 Liter Classic	10203_05
5 Liter Neutral	10209_05
10 Liter Lemon	10220
10 Liter Classic	10203
10 Liter Neutral	10209

Weitere Produkte die mit KK Schnelldesinfektion hergestellt werden:

KK Desinfektionstücher 120 und 200 Tücher pro Dose und Refillbeutel
in den Duftrichtungen „Classic, Neutral und Lemon“ (Biozidprodukte)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

KK Quick & Clean Wipes & KK Quick & Clean S-Wipes „ready to use“
in den Duftrichtungen „Classic, Neutral und Lemon“

Hersteller:

PLIWA Hygiene GmbH, Pliwastraße 2, 34323 Malsfeld

Vertreiber:

KK Hygiene Produkte, Werner-von-Siemens-Straße 2, 49401 Damme, www.kk-hygiene.de